



## ข้อมูลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาบาล

### หุ่นสว่นปัสสาวะหญิงครึ่งท่อน

รหัสครุภัณฑ์ : PSRU-2200-6545-016-32-62

จำนวน : 1 ชุด

คุณลักษณะ :

Weight : 4.5 Kg. Length : 30 cm. Width : 40 cm.



### คุณสมบัติ / การใช้งาน

- เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่เพศหญิงจากส่วนเอวถึงต้นขาอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่สายสวนปัสสาวะ
- ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์ มีความแข็งแรงทนทาน
- อวัยวะเพศหญิงโครงสร้างที่ประกอบด้วยแคม และปากท่อปัสสาวะ
- ส่วนของอวัยวะเพศหญิง มีความอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดง่าย มีแคมนอกที่ปิด สามารถฝึกการใช้นิ้วมือแหวกออกได้คล้ายคนจริง
- สามารถฝึกการสวนปัสสาวะได้ทางท่อปัสสาวะ
- สามารถใช้ฝึกทักษะการดูแลและการทำความสะอาดขณะใส่สวนปัสสาวะแบบ Suprapubic
- ภายในภาชนะบรรจุน้ำแบบโปร่งใสที่ทำหน้าที่เป็นกระเพาะปัสสาวะจำลอง
- ระบบน้ำเป็นแบบท่อน้ำตรงจากขวดน้ำสู่กระเพาะปัสสาวะจำลอง โดยจุดเชื่อมต่ออยู่ทางด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะจำลอง และมีแรงดันน้ำโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วง
- อวัยวะเพศ และกระเพาะปัสสาวะจำลอง ประกอบกันเข้าเป็นชุดเดียว สามารถถอดออกจากเชิงกรานได้พร้อมกันทั้งชุด
- เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง น้ำจากกระเพาะปัสสาวะจำลองจะไหลออกมาทางสายสวน
- มีการจำลองแรงต้านของหูรูดในทางเดินปัสสาวะ ที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกถึงแรงต้านได้จริงเมื่อใส่สายสวนผ่านหูรูด
- มีเสาน้ำเกลือติดตั้งอยู่บนสะโพกด้านซ้ายของตัวหุ่น
- อวัยวะเพศประกอบเข้ากับหุ่นเชิงกรานด้วยแม่เหล็ก

### ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ปากกาขีดเขียนบนตัวหุ่น

## ข้อมูลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาบาล

### หุ่นสวนปัสสาวะชายครึ่งท่อน

รหัสครุภัณฑ์ : PSRU-2200-6545-016-31-62

จำนวน : 1 ชุด

คุณลักษณะ :

Weight : 2.5 Kg.      Length : 20 cm.      Width : 10 cm.



### คุณสมบัติ / การใช้งาน

- เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศชายวางอยู่บนแท่นรองหุ่นติดตั้งอยู่บนฐานรอง
- สามารถใส่สายสวนปัสสาวะและตัวหุ่นสามารถยกออกจากแท่นสวมได้
- ส่วนของอวัยวะเพศมีโครงสร้างคล้ายจริงมีหนังหุ้มปลาย ฝีกการรูดได้ มีความอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดง่าย
- แท่นของหุ่นมีขั้วแม่เหล็ก เพื่อง่ายต่อการใส่และการถอดอวัยวะสำหรับฝีก
- แท่นตั้งโต๊ะแข็งแรง ไม่ลื่น ซึ่งสามารถนำอวัยวะเพศชายไปประกอบเพื่อการฝีกได้
- มีท่อปัสสาวะที่สามารถใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายคนจริง
- ภายในเป็นกระเปาะโปร่งใส เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง ผู้ฝีกสามารถมองเห็นปลายสายที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน สามารถ blow balloon ได้
- เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง น้ำปัสสาวะจำลองจะไหลออกมาทางสายสวน ระบบแรงดันน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง มีเสาแขวนกระปุกน้ำที่ติดตั้งอยู่บนฐานพร้อมหุ่น เป็นชุดเดียวกันไม่แยกสวน
- สามารถปรับขนาดของท่อปัสสาวะได้สามระดับ
- มีการจำลองแรงต้านของหูรูดในทางเดินปัสสาวะ ที่ผู้ฝีกสามารถรู้สึกถึงแรงต้านได้จริง เมื่อใส่สายสวนผ่านหูรูด

### ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ปากกาขีดเขียนบนตัวหุ่น